

fr

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

La lentille intraoculaire une pièce en acrylique hydrophobe enVista^{MD} (enVista IOL) a été développée pour remplacer le cristallin naturel chez les patients adultes dont le cristallin atteint de cataracte a été retiré.

La enVista IOL a une optique asphérique conçue pour être exempte d'aberrations sphériques grâce à l'incorporation d'une conception optique exclusive qui est neutre par rapport aux aberrations sphériques et qui n'influence pas le profil des aberrations sphériques cornéennes préopératoires. L'optique est conçue avec le bord postérieur carré SureEdgeSM pour fournir une barrière PCO sur 360 degrés. La enVista IOL utilise un élément haptique AccuseSM avec une conception large et modifiée en boucle en C et un décalage optique-haptique pour améliorer le contact et la stabilité au sein du sac capsulaire. Le matériau enVista qui compose l'optique TruSightSM a été évalué pour sa capacité sans scintillement et sa résistance aux rayures. La technologie StableFlexSM intégrée améliore la conformité de la lentille, facilite le chargement, optimise le contrôle par la livraison de la lentille et permet une récupération optique efficace après l'implantation.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU MODÈLE enVista MX60PL

Matériau de lentille / Surface	Le matériau est un polymère hydrophobe (polyméthacrylate méthacrylate (PMMA)) recouvert d'un revêtement de silicium (SiO ₂) pour améliorer la biocompatibilité et la résistance aux rayures.
Caractéristiques de la lentille	Indice de réfraction: 1,53 (35 °C, densité optique: 1,19 g/cm ³)
Type optique / Longueur d'onde	Asphérique (0,01 ± 0,02 Dioptries (D)) à 100 nm (incréments de 1,0 Dioptrie, +18,0 à -18,0 par incréments de 0,5 Dioptrie) et 0,01 ± 0,02 Dioptries (D) à 400 nm (incréments de 1,0 Dioptrie)
Détection	Détection de choc: 0,5 mm, Détection globale: 1,5 mm, Angle haptique: 0°
Transparence	Transparence: 99,99% à 400 nm, 99,99% à 500 nm, 99,99% à 600 nm, 99,99% à 700 nm, 99,99% à 800 nm, 99,99% à 900 nm, 99,99% à 1000 nm, 99,99% à 1100 nm, 99,99% à 1200 nm, 99,99% à 1300 nm, 99,99% à 1400 nm, 99,99% à 1500 nm, 99,99% à 1600 nm, 99,99% à 1700 nm, 99,99% à 1800 nm, 99,99% à 1900 nm, 99,99% à 2000 nm, 99,99% à 2100 nm, 99,99% à 2200 nm, 99,99% à 2300 nm, 99,99% à 2400 nm, 99,99% à 2500 nm, 99,99% à 2600 nm, 99,99% à 2700 nm, 99,99% à 2800 nm, 99,99% à 2900 nm, 99,99% à 3000 nm, 99,99% à 3100 nm, 99,99% à 3200 nm, 99,99% à 3300 nm, 99,99% à 3400 nm, 99,99% à 3500 nm, 99,99% à 3600 nm, 99,99% à 3700 nm, 99,99% à 3800 nm, 99,99% à 3900 nm, 99,99% à 4000 nm, 99,99% à 4100 nm, 99,99% à 4200 nm, 99,99% à 4300 nm, 99,99% à 4400 nm, 99,99% à 4500 nm, 99,99% à 4600 nm, 99,99% à 4700 nm, 99,99% à 4800 nm, 99,99% à 4900 nm, 99,99% à 5000 nm, 99,99% à 5100 nm, 99,99% à 5200 nm, 99,99% à 5300 nm, 99,99% à 5400 nm, 99,99% à 5500 nm, 99,99% à 5600 nm, 99,99% à 5700 nm, 99,99% à 5800 nm, 99,99% à 5900 nm, 99,99% à 6000 nm, 99,99% à 6100 nm, 99,99% à 6200 nm, 99,99% à 6300 nm, 99,99% à 6400 nm, 99,99% à 6500 nm, 99,99% à 6600 nm, 99,99% à 6700 nm, 99,99% à 6800 nm, 99,99% à 6900 nm, 99,99% à 7000 nm, 99,99% à 7100 nm, 99,99% à 7200 nm, 99,99% à 7300 nm, 99,99% à 7400 nm, 99,99% à 7500 nm, 99,99% à 7600 nm, 99,99% à 7700 nm, 99,99% à 7800 nm, 99,99% à 7900 nm, 99,99% à 8000 nm, 99,99% à 8100 nm, 99,99% à 8200 nm, 99,99% à 8300 nm, 99,99% à 8400 nm, 99,99% à 8500 nm, 99,99% à 8600 nm, 99,99% à 8700 nm, 99,99% à 8800 nm, 99,99% à 8900 nm, 99,99% à 9000 nm, 99,99% à 9100 nm, 99,99% à 9200 nm, 99,99% à 9300 nm, 99,99% à 9400 nm, 99,99% à 9500 nm, 99,99% à 9600 nm, 99,99% à 9700 nm, 99,99% à 9800 nm, 99,99% à 9900 nm, 99,99% à 10000 nm, 99,99% à 10100 nm, 99,99% à 10200 nm, 99,99% à 10300 nm, 99,99% à 10400 nm, 99,99% à 10500 nm, 99,99% à 10600 nm, 99,99% à 10700 nm, 99,99% à 10800 nm, 99,99% à 10900 nm, 99,99% à 11000 nm, 99,99% à 11100 nm, 99,99% à 11200 nm, 99,99% à 11300 nm, 99,99% à 11400 nm, 99,99% à 11500 nm, 99,99% à 11600 nm, 99,99% à 11700 nm, 99,99% à 11800 nm, 99,99% à 11900 nm, 99,99% à 12000 nm, 99,99% à 12100 nm, 99,99% à 12200 nm, 99,99% à 12300 nm, 99,99% à 12400 nm, 99,99% à 12500 nm, 99,99% à 12600 nm, 99,99% à 12700 nm, 99,99% à 12800 nm, 99,99% à 12900 nm, 99,99% à 13000 nm, 99,99% à 13100 nm, 99,99% à 13200 nm, 99,99% à 13300 nm, 99,99% à 13400 nm, 99,99% à 13500 nm, 99,99% à 13600 nm, 99,99% à 13700 nm, 99,99% à 13800 nm, 99,99% à 13900 nm, 99,99% à 14000 nm, 99,99% à 14100 nm, 99,99% à 14200 nm, 99,99% à 14300 nm, 99,99% à 14400 nm, 99,99% à 14500 nm, 99,99% à 14600 nm, 99,99% à 14700 nm, 99,99% à 14800 nm, 99,99% à 14900 nm, 99,99% à 15000 nm, 99,99% à 15100 nm, 99,99% à 15200 nm, 99,99% à 15300 nm, 99,99% à 15400 nm, 99,99% à 15500 nm, 99,99% à 15600 nm, 99,99% à 15700 nm, 99,99% à 15800 nm, 99,99% à 15900 nm, 99,99% à 16000 nm, 99,99% à 16100 nm, 99,99% à 16200 nm, 99,99% à 16300 nm, 99,99% à 16400 nm, 99,99% à 16500 nm, 99,99% à 16600 nm, 99,99% à 16700 nm, 99,99% à 16800 nm, 99,99% à 16900 nm, 99,99% à 17000 nm, 99,99% à 17100 nm, 99,99% à 17200 nm, 99,99% à 17300 nm, 99,99% à 17400 nm, 99,99% à 17500 nm, 99,99% à 17600 nm, 99,99% à 17700 nm, 99,99% à 17800 nm, 99,99% à 17900 nm, 99,99% à 18000 nm, 99,99% à 18100 nm, 99,99% à 18200 nm, 99,99% à 18300 nm, 99,99% à 18400 nm, 99,99% à 18500 nm, 99,99% à 18600 nm, 99,99% à 18700 nm, 99,99% à 18800 nm, 99,99% à 18900 nm, 99,99% à 19000 nm, 99,99% à 19100 nm, 99,99% à 19200 nm, 99,99% à 19300 nm, 99,99% à 19400 nm, 99,99% à 19500 nm, 99,99% à 19600 nm, 99,99% à 19700 nm, 99,99% à 19800 nm, 99,99% à 19900 nm, 99,99% à 20000 nm, 99,99% à 20100 nm, 99,99% à 20200 nm, 99,99% à 20300 nm, 99,99% à 20400 nm, 99,99% à 20500 nm, 99,99% à 20600 nm, 99,99% à 20700 nm, 99,99% à 20800 nm, 99,99% à 20900 nm, 99,99% à 21000 nm, 99,99% à 21100 nm, 99,99% à 21200 nm, 99,99% à 21300 nm, 99,99% à 21400 nm, 99,99% à 21500 nm, 99,99% à 21600 nm, 99,99% à 21700 nm, 99,99% à 21800 nm, 99,99% à 21900 nm, 99,99% à 22000 nm, 99,99% à 22100 nm, 99,99% à 22200 nm, 99,99% à 22300 nm, 99,99% à 22400 nm, 99,99% à 22500 nm, 99,99% à 22600 nm, 99,99% à 22700 nm, 99,99% à 22800 nm, 99,99% à 22900 nm, 99,99% à 23000 nm, 99,99% à 23100 nm, 99,99% à 23200 nm, 99,99% à 23300 nm, 99,99% à 23400 nm, 99,99% à 23500 nm, 99,99% à 23600 nm, 99,99% à 23700 nm, 99,99% à 23800 nm, 99,99% à 23900 nm, 99,99% à 24000 nm, 99,99% à 24100 nm, 99,99% à 24200 nm, 99,99% à 24300 nm, 99,99% à 24400 nm, 99,99% à 24500 nm, 99,99% à 24600 nm, 99,99% à 24700 nm, 99,99% à 24800 nm, 99,99% à 24900 nm, 99,99% à 25000 nm, 99,99% à 25100 nm, 99,99% à 25200 nm, 99,99% à 25300 nm, 99,99% à 25400 nm, 99,99% à 25500 nm, 99,99% à 25600 nm, 99,99% à 25700 nm, 99,99% à 25800 nm, 99,99% à 25900 nm, 99,99% à 26000 nm, 99,99% à 26100 nm, 99,99% à 26200 nm, 99,99% à 26300 nm, 99,99% à 26400 nm, 99,99% à 26500 nm, 99,99% à 26600 nm, 99,99% à 26700 nm, 99,99% à 26800 nm, 99,99% à 26900 nm, 99,99% à 27000 nm, 99,99% à 27100 nm, 99,99% à 27200 nm, 99,99% à 27300 nm, 99,99% à 27400 nm, 99,99% à 27500 nm, 99,99% à 27600 nm, 99,99% à 27700 nm, 99,99% à 27800 nm, 99,99% à 27900 nm, 99,99% à 28000 nm, 99,99% à 28100 nm, 99,99% à 28200 nm, 99,99% à 28300 nm, 99,99% à 28400 nm, 99,99% à 28500 nm, 99,99% à 28600 nm, 99,99% à 28700 nm, 99,99% à 28800 nm, 99,99% à 28900 nm, 99,99% à 29000 nm, 99,99% à 29100 nm, 99,99% à 29200 nm, 99,99% à 29300 nm, 99,99% à 29400 nm, 99,99% à 29500 nm, 99,99% à 29600 nm, 99,99% à 29700 nm, 99,99% à 29800 nm, 99,99% à 29900 nm, 99,99% à 30000 nm, 99,99% à 30100 nm, 99,99% à 30200 nm, 99,99% à 30300 nm, 99,99% à 30400 nm, 99,99% à 30500 nm, 99,99% à 30600 nm, 99,99% à 30700 nm, 99,99% à 30800 nm, 99,99% à 30900 nm, 99,99% à 31000 nm, 99,99% à 31100 nm, 99,99% à 31200 nm, 99,99% à 31300 nm, 99,99% à 31400 nm, 99,99% à 31500 nm, 99,99% à 31600 nm, 99,99% à 31700 nm, 99,99% à 31800 nm, 99,99% à 31900 nm, 99,99% à 32000 nm, 99,99% à 32100 nm, 99,99% à 32200 nm, 99,99% à 32300 nm, 99,99% à 32400 nm, 99,99% à 32500 nm, 99,99% à 32600 nm, 99,99% à 32700 nm, 99,99% à 32800 nm, 99,99% à 32900 nm, 99,99% à 33000 nm, 99,99% à 33100 nm, 99,99% à 33200 nm, 99,99% à 33300 nm, 99,99% à 33400 nm, 99,99% à 33500 nm, 99,99% à 33600 nm, 99,99% à 33700 nm, 99,99% à 33800 nm, 99,99% à 33900 nm, 99,99% à 34000 nm, 99,99% à 34100 nm, 99,99% à 34200 nm, 99,99% à 34300 nm, 99,99% à 34400 nm, 99,99% à 34500 nm, 99,99% à 34600 nm, 99,99% à 34700 nm, 99,99% à 34800 nm, 99,99% à 34900 nm, 99,99% à 35000 nm, 99,99% à 35100 nm, 99,99% à 35200 nm, 99,99% à 35300 nm, 99,99% à 35400 nm, 99,99% à 35500 nm, 99,99% à 35600 nm, 99,99% à 35700 nm, 99,99% à 35800 nm, 99,99% à 35900 nm, 99,99% à 36000 nm, 99,99% à 36100 nm, 99,99% à 36200 nm, 99,99% à 36300 nm, 99,99% à 36400 nm, 99,99% à 36500 nm, 99,99% à 36600 nm, 99,99% à 36700 nm, 99,99% à 36800 nm, 99,99% à 36900 nm, 99,99% à 37000 nm, 99,99% à 37100 nm, 99,99% à 37200 nm, 99,99% à 37300 nm, 99,99% à 37400 nm, 99,99% à 37500 nm, 99,99% à 37600 nm, 99,99% à 37700 nm, 99,99% à 37800 nm, 99,99% à 37900 nm, 99,99% à 38000 nm, 99,99% à 38100 nm, 99,99% à 38200 nm, 99,99% à 38300 nm, 99,99% à 38400 nm, 99,99% à 38500 nm, 99,99% à 38600 nm, 99,99% à 38700 nm, 99,99% à 38800 nm, 99,99% à 38900 nm, 99,99% à 39000 nm, 99,99% à 39100 nm, 99,99% à 39200 nm, 99,99% à 39300 nm, 99,99% à 39400 nm, 99,99% à 39500 nm, 99,99% à 39600 nm, 99,99% à 39700 nm, 99,99% à 39800 nm, 99,99% à 39900 nm, 99,99% à 40000 nm, 99,99% à 40100 nm, 99,99% à 40200 nm, 99,99% à 40300 nm, 99,99% à 40400 nm, 99,99% à 40500 nm, 99,99% à 40600 nm, 99,99% à 40700 nm, 99,99% à 40800 nm, 99,99% à 40900 nm, 99,99% à 41000 nm, 99,99% à 41100 nm, 99,99% à 41200 nm, 99,99% à 41300 nm, 99,99% à 41400 nm, 99,99% à 41500 nm, 99,99% à 41600 nm, 99,99% à 41700 nm, 99,99% à 41800 nm, 99,99% à 41900 nm, 99,99% à 42000 nm, 99,99% à 42100 nm, 99,99% à 42200 nm, 99,99% à 42300 nm, 99,99% à 42400 nm, 99,99% à 42500 nm, 99,99% à 42600 nm, 99,99% à 42700 nm, 99,99% à 42800 nm, 99,99% à 42900 nm, 99,99% à 43000 nm, 99,99% à 43100 nm, 99,99% à 43200 nm, 99,99% à 43300 nm, 99,99% à 43400 nm, 99,99% à 43500 nm, 99,99% à 43600 nm, 99,99% à 43700 nm, 99,99% à 43800 nm, 99,99% à 43900 nm, 99,99% à 44000 nm, 99,99% à 44100 nm, 99,99% à 44200 nm, 99,99% à 44300 nm, 99,99% à 44400 nm, 99,99% à 44500 nm, 99,99% à 44600 nm, 99,99% à 44700 nm, 99,99% à 44800 nm, 99,99% à 44900 nm, 99,99% à 45000 nm, 99,99% à 45100 nm, 99,99% à 45200 nm, 99,99% à 45300 nm, 99,99% à 45400 nm, 99,99% à 45500 nm, 99,99% à 45600 nm, 99,99% à 45700 nm, 99,99% à 45800 nm, 99,99% à 45900 nm, 99,99% à 46000 nm, 99,99% à 46100 nm, 99,99% à 46200 nm, 99,99% à 46300 nm, 99,99% à 46400 nm, 99,99% à 46500 nm, 99,99% à 46600 nm, 99,99% à 46700 nm, 99,99% à 46800 nm, 99,99% à 46900 nm, 99,99% à 47000 nm, 99,99% à 47100 nm, 99,99% à 47200 nm, 99,99% à 47300 nm, 99,99% à 47400 nm, 99,99% à 47500 nm, 99,99% à 47600 nm, 99,99% à 47700 nm, 99,99% à 47800 nm, 99,99% à 47900 nm, 99,99% à 48000 nm, 99,99% à 48100 nm, 99,99% à 48200 nm, 99,99% à 48300 nm, 99,99% à 48400 nm, 99,99% à 48500 nm, 99,99% à 48600 nm, 99,99% à 48700 nm, 99,99% à 48800 nm, 99,99% à 48900 nm, 99,99% à 49000 nm, 99,99% à 49100 nm, 99,99% à 49200 nm, 99,99% à 49300 nm, 99,99% à 49400 nm, 99,99% à 49500 nm, 99,99% à 49600 nm, 99,99% à 49700 nm, 99,99% à 49800 nm, 99,99% à 49900 nm, 99,99% à 50000 nm, 99,99% à 50100 nm, 99,99% à 50200 nm, 99,99% à 50300 nm, 99,99% à 50400 nm, 99,99% à 50500 nm, 99,99% à 50600 nm, 99,99% à 50700 nm, 99,99% à 50800 nm, 99,99% à 50900 nm, 99,99% à 51000 nm, 99,99% à 51100 nm, 99,99% à 51200 nm, 99,99% à 51300 nm, 99,99% à 51400 nm, 99,99% à 51500 nm, 99,99% à 51600 nm, 99,99% à 51700 nm, 99,99% à 51800 nm, 99,99% à 51900 nm, 99,99% à 52000 nm, 99,99% à 52100 nm, 99,99% à 52200 nm, 99,99% à 52300 nm, 99,99% à 52400 nm, 99,99% à 52500 nm, 99,99% à 52600 nm, 99,99% à 52700 nm, 99,99% à 52800 nm, 99,99% à 52900 nm, 99,99% à 53000 nm, 99,99% à 53100 nm, 99,99% à 53200 nm, 99,99% à 53300 nm, 99,99% à 53400 nm, 99,99% à 53500 nm, 99,99% à 53600 nm, 99,99% à 53700 nm, 99,99% à 53800 nm, 99,99% à 53900 nm, 99,99% à 54000 nm, 99,99% à 54100 nm, 99,99% à 54200 nm, 99,99% à 54300 nm, 99,99% à 54400 nm, 99,99% à 54500 nm, 99,99% à 54600 nm, 99,99% à 54700 nm, 99,99% à 54800 nm, 99,99% à 54900 nm, 99,99% à 55000 nm, 99,99% à 55100 nm, 99,99% à 55200 nm, 99,99% à 55300 nm, 99,99% à 55400 nm, 99,99% à 55500 nm, 99,99% à 55600 nm, 99,99% à 55700 nm, 99,99% à 55800 nm, 99,99% à 55900 nm, 99,99% à 56000 nm, 99,99% à 56100 nm, 99,99% à 56200 nm, 99,99% à 56300 nm, 99,99% à 56400 nm, 99,99% à 56500 nm, 99,99% à 56600 nm, 99,99% à 56700 nm, 99,99% à 56800 nm, 99,99% à 56900 nm, 99,99% à 57000 nm, 99,99% à 57100 nm, 99,99% à 57200 nm, 99,99% à 57300 nm, 99,99% à 57400 nm, 99,99% à 57500 nm, 99,99% à 57600 nm, 99,99% à 57700 nm, 99,99% à 57800 nm, 99,99% à 57900 nm, 99,99% à 58000 nm, 99,99% à 58100 nm, 99,99% à 58200 nm, 99,99% à 58300 nm, 99,99% à 58400 nm, 99,99% à 58500 nm, 99,99% à 58600 nm, 99,99% à 58700 nm, 99,99% à 58800 nm, 99,99% à 58900 nm, 99,99% à 59000 nm, 99,99% à 59100 nm, 99,99% à 59200 nm, 99,99% à 59300 nm, 99,99% à 59400 nm, 99,99% à 59500 nm, 99,99% à 59600 nm, 99,99% à 59700 nm, 99,99% à 59800 nm, 99,99% à 59900 nm, 99,99% à 60000 nm, 99,99% à 60100 nm, 99,99% à 60200 nm, 99,99% à 60300 nm, 99,99% à 60400 nm, 99,99% à 60500 nm, 99,99% à 60600 nm, 99,99% à 60700 nm, 99,99% à 60800 nm, 99,99% à 60900 nm, 99,99% à 61000 nm, 99,99% à 61100 nm, 99,99% à 61200 nm, 99,99% à 61300 nm, 99,99% à 61400 nm, 99,99% à 61500 nm, 99,99% à 61600 nm, 99,99% à 61700 nm, 99,99% à 61800 nm, 99,99% à 61900 nm, 99,99% à 62000 nm, 99,99% à 62100 nm, 99,99% à 62200 nm, 99,99% à 62300 nm, 99,99% à 62400 nm, 99,99% à 62500 nm, 99,99% à 62600 nm, 99,99% à 62700 nm, 99,99% à 62800 nm, 99,99% à 62900 nm, 99,99% à 63000 nm, 99,99% à 63100 nm, 99,99% à 63200 nm, 99,99% à 63300 nm, 99,99% à 63400 nm, 99,99% à 63500 nm, 99,99% à 63600 nm, 99,99% à 63700 nm, 99,99% à 63800 nm, 99,99% à 63900 nm, 99,99% à 64000 nm, 99,99% à 64100 nm, 99,99% à 64200 nm, 99,99% à 64300 nm, 99,99% à 64400 nm, 99,99% à 64500 nm, 99,99% à 64600 nm, 99,99% à 64700 nm, 99,99% à 64800 nm, 99,99% à 64900 nm, 99,99% à 65000 nm, 99,99% à 65100 nm, 99,99% à 65200 nm, 99,99% à 65300 nm, 99,99% à 65400 nm, 99,99% à 65500 nm, 99,99% à 65600 nm, 99,99% à 65700 nm, 99,99% à 65800 nm, 99,99% à 65900 nm, 99,99% à 66000 nm, 99,99% à 66100 nm, 99,99% à 66200 nm, 99,99% à 66300 nm, 99,99% à 66400 nm, 99,99% à 66500 nm, 99,99% à 66600 nm, 99,99% à 66700 nm, 99,99% à 66800 nm, 99,99% à 66900 nm, 99,99% à 67000 nm, 99,99% à 67100 nm, 99,99% à 67200 nm, 99,99% à 67300 nm, 99,99% à 67400 nm, 99,99% à 67500 nm, 99,99% à 67600 nm, 99,99% à 67700 nm, 99,99% à 67800 nm, 99,99% à 67900 nm, 99,99% à 68000 nm, 99,99% à 68100 nm, 99,99% à 68200 nm, 99,99% à 68300 nm, 99,99% à 68400 nm, 99,99% à 68500 nm, 99,99% à 68600 nm, 99,99% à 68700 nm, 99,99% à 68800 nm, 99,99% à 68900 nm, 99,99% à 69000 nm, 99,99% à 69100 nm, 99,99% à 69200 nm, 99,99% à 69300 nm, 99,99% à 69400 nm, 99,99% à 69500 nm, 99,99% à 69600 nm, 99,99% à 69700 nm, 99,99% à 69800 nm, 99,99% à 69900 nm, 99,99% à 70000 nm, 99,99% à 70100 nm, 99,99% à 70200 nm, 99,99% à 70300 nm, 99,99% à 70400 nm, 99,99% à 70500 nm, 99,99% à 70600 nm, 99,99% à 70700 nm, 99,99% à 70800 nm, 99,99% à 70900 nm, 99,99% à 71000 nm, 99,99% à 71100 nm, 99,99% à 71200 nm, 99,99% à 71300 nm, 99,99% à 71400 nm, 99,99% à 71500 nm, 99,99% à 71600 nm, 99,99% à 71700 nm, 99,99% à 71800 nm, 99,99% à 71900 nm, 99,99% à 72000 nm, 99,99% à 72100 nm, 99,99% à 72200 nm, 99,99% à 72300 nm, 99,99% à 72400 nm, 99,99% à 72500 nm, 99,99% à 72600 nm, 99,99% à 72700 nm, 99,99% à 72800 nm, 99,99% à 72900 nm, 99,99% à 73000 nm, 99,99% à 73100 nm,